



1 Acople un adhesivo de sujeción al equipo **Somnibel Pro** hasta oír un "clic" (la luz parpadea 3 veces en verde y el equipo vibra).

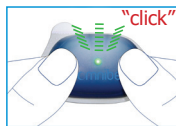

3 Retire la cubierta protectora del adhesivo.

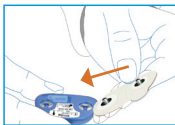

5 Túmbese para dormir.



7 Deseche el adhesivo de sujeción y su cubierta protectora.



2 Preste atención a las indicaciones del equipo después de encenderlo (consulte los **INDICADORES VISUALES Y AVISOS** en el reverso de esta guía).











4 Preste atención a la orientación correcta indicada por una flecha en la etiqueta del equipo. Coloque el equipo con el adhesivo en la frente.

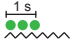6 A la mañana siguiente, retire el adhesivo de sujeción de la piel y sepárelo del equipo (compruebe que la luz verde parpadea dos veces).

8 Conecte el equipo a la red eléctrica mediante el cargador de batería. Compruebe que se enciende la luz en verde.

9 Cuando se apaga la luz, la batería del dispositivo está completamente cargada y puede desconectarse de la red eléctrica.

10 Cuando no lo utilice, guarde el equipo y los accesorios en su embalaje.

INDICADOR	DEFINICIÓN	COMENTARIOS
	ENCENDIDO	
	EN MARCHA	
	APAGADO	
	MEMORIA BAJA	Espacio para la memoria de señales <3 sesiones de tratamiento. Contacte con su médico.
	MEMORIA LLENA	36 sesiones ya grabadas. Las siguientes no se grabarán. Contacte con su médico.
	BATERÍA BAJA	Conecte el equipo a la red mediante el cargador de batería.
	CARGANDO	La luz se apaga cuando el equipo está completamente cargado.
	ERROR DE ANCLAJE	Adhesivo incorrectamente acoplado al equipo. Verifique los dos corchetes del adhesivo antes de continuar utilizando el equipo.
	ERROR DE AUTO-TEST	Error interno del equipo. Contacte con su médico.
	ERROR DE MEMORIA	

Datos de contacto: